

Les Tables  
de Franck

# MICRODERMABRASION

Appareil de microdermabrasion  
Mode d'emploi  
FR

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.





L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	TUYAU	10029	1
2	POIGNÉE	-	2
3	SAC DE FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE	40010	1
4	TÊTE DIAMANT Ø6		1
5	TÊTE DIAMANT Ø8		1
6	TÊTE DIAMANT Ø15		3
7	TÊTE DIAMANT Ø19		2
8	TÊTE DIAMANT Ø22		2
9	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
10	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

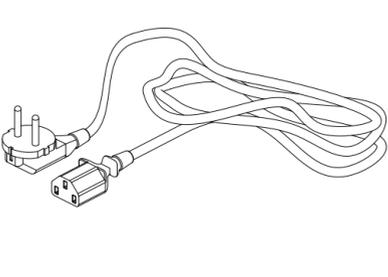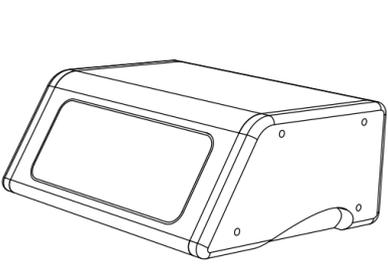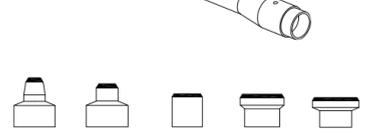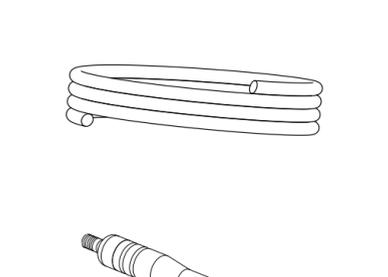

## PANNEAU AVANT/PANNEAU ARRIÈRE

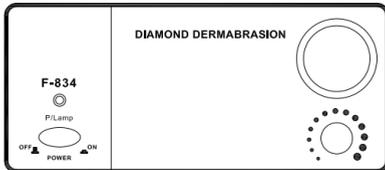


1. Tuyau

2. Câble alimentation

## MODE D'EMPLOI

1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.

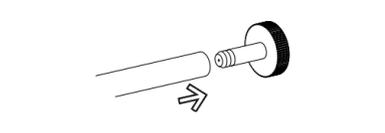

3. Branchez l'autre extrémité du tuyau au manche aspirateur. Placez la pointe en diamant adaptée dans le manche. Il existe neuf types de pointes en diamant.




Ø 22 MM  
D100 Corps. Convient pour l'acné, les genoux, les coudes et les zones avec vergetures

Ø 19 MM  
D180 Visage. Convient pour de grandes taches, pores, le vieillissement exposition au soleil


Ø 15 MM  
D100 Les cicatrices, les ridules et les imperfections diverses  
D200  
D250

Ø 8 ET 6 MM  
D200 Les yeux et les deux côtés du nez.  
D250 Rides, acné, boutons et points noirs

4. Vérifiez que le filtre en mousse est correctement positionné dans le manche.

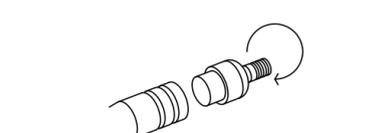

5. Vérifiez que le filtre en métal est correctement positionné dans le manche.

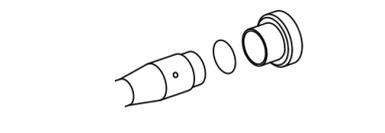

6. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en réglant le régulateur.

7. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant ou découvrant le trou sur le côté du manche avec votre doigt.

8. Une fois que vous avez terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «POWER».

## CAUTIONS

• Ne laissez pas le manche aspirateur au même endroit de la peau trop longtemps car cela peut provoquer des blessures.

• Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau irritée.

• Les zones suivantes ne sont pas adaptées pour les traitements : tumeurs de la peau, grains de beauté, marques de naissance, angiomes, lèvres, yeux, herpès, et verrues.

• Le régulateur de pression peut être complètement dévissé. Si cela arrive par accident, vous pouvez le revisser et l'appareil fonctionnera de nouveau correctement.

• Ne faites pas fonctionner la pompe à vide pendant de longues périodes sans avoir laissé de périodes pour refroidir entre chaque afin d'empêcher une surchauffe de la pompe qui pourrait provoquer un dommage sur l'appareil. Les dommages provoqués par une surchauffe de la pompe ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant.

## FAQ

Si l'appareil n'aspire pas sous l'action du régulateur de pression:

• Dévissez le régulateur de pression complètement.

## SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	36x31x1,85
	Poids brut (kg)	3,8
	Dimensions produit (cm)	31x17/24x13
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	65 W
	Pression de travail	0 bar ~ -0,8 bar
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	65 W

• Vérifiez que la valve en caoutchouc noir au bout du régulateur n'est pas cassée.

• Si elle l'est, retirez les valves de l'appareil et du régulateur.

• Prenez une des valves en caoutchouc noir fournies et insérez-la dans le régulateur en appliquant une pression.

Si l'effet d'aspiration est diminué:

• Remplacez les filtres en métal et en mousse.

## MAINTENANCE

• Le filtre en mousse dans le manche doit être changé tous les 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.

• Le filtre en métal dans le manche doit être changé tous les 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.

• Nettoyez et stérilisez les pointes en diamant après chaque traitement.

## ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10029	SONDE YEUX
40010	SAC DE FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE
	TÊTE DIAMANT Ø6
	TÊTE DIAMANT Ø8
	TÊTE DIAMANT Ø15
	TÊTE DIAMANT Ø19
	TÊTE DIAMANT Ø22

## ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

## RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

## BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous