

Les Tables
de Franck

HAUTE FRÉQUENCE

Appareil Haute Fréquence

Mode d'emploi

FR

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.








L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



- Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

- L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	ÉLECTRODE 1	10009	1
2	ÉLECTRODE 2	10010	1
3	ÉLECTRODE 3	10011	1
4	ÉLECTRODE 4	10012	1
5	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE	10040	1
6	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
7	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

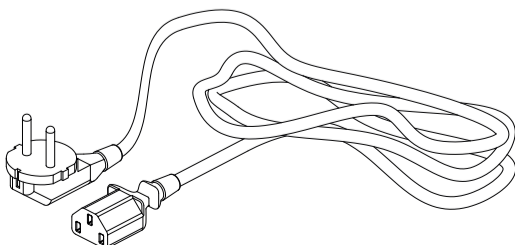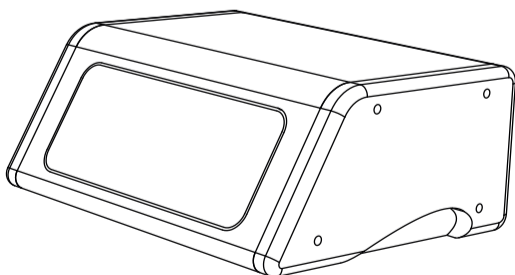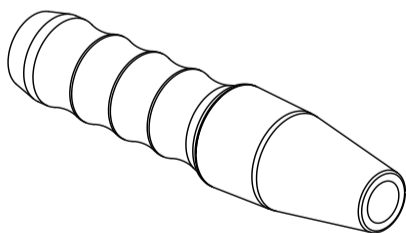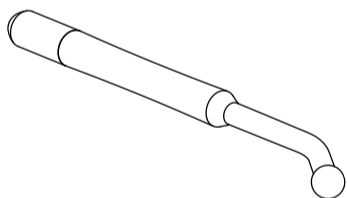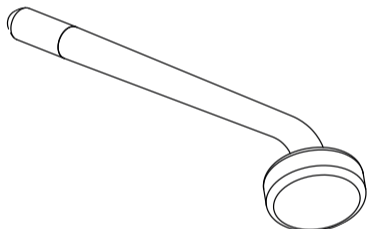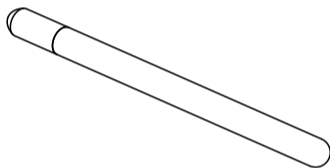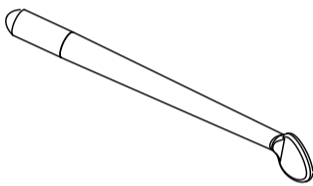

PANNEAU AVANT/PANNEAU ARRIÈRE

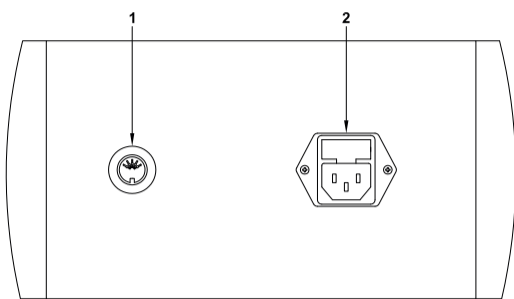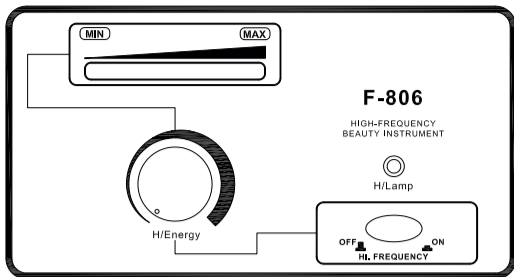

1. Poignée haute fréquence


2. Câble alimentation

MODE D'EMPLOI

1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.

3. Choisissez le tuyau d'électrode en verre adapté et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche (veillez à ne pas toucher l'électrode de verre avec vos mains ou tout autre objet en métal).

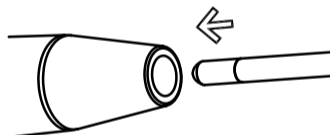

Types de tuyaux d'électrode en verre:

a. Tuyau d'électrode en forme de champignon: utilisé sur de larges zones de peau, comme par exemple le visage, le front, le cou, etc.

b. Tuyau d'électrode en forme de louche: utilisé sur des zones moyennes, telles que le menton, etc.

c. Tuyau d'électrode en forme de balle: utilisé sur de petites zones, comme le nez, etc.

d. Tuyau d'électrode droit: utilisé en cas de traitement indirect.

4. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» et assurez-vous que l'option «H/ENERGY» est réglée sur le minimum.

5. Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «H/ENERGY».

6. Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal

avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.

7. À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» au niveau minimal puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» avant de retirer l'électrode du visage du client.

Usage indirect

1. Choisissez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche.

2. Donnez le combiné au client, en vous assurant que le client tient l'électrode en verre et non le manche.

3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» et en vous assurant que l'option « H/ENERGY » est réglée au minimum.

4. Ajustez doucement l'éjection en réglant l'option «H/ENERGY»

5. Effectuez le massage facial ou le traitement en utilisant le produit prescrit comme demandé. Pendant toute la durée du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode en verre tenue par le client.

6. À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» jusqu'au minimum puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY».

CAUTIONS

- L'électrode en verre brillera lorsque se trouve à moins de 2 cm de la peau lorsque l'instrument est allumé. Dans ce cas, réduisez l'énergie de l'appareil à haute fréquence. Si le client sent toujours l'étincelle, il peut se couvrir le visage avec une petite serviette en coton mais

jamais avec une serviette en nylon ou synthétique.

- Avant de retirer l'électrode de verre de la peau, réduisez l'option «ENERGY» à son minimum puis éteignez l'appareil avant de le retirer de la peau.

- Les clients ne peuvent pas porter d'objets en métal ou de bijoux; tous les objets doivent être retirés avant de commencer le traitement.

- Les femmes enceintes ou les personnes ayant un pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur) ne peuvent pas être soumises à des traitements à haute fréquence.

- Les produits utilisés lors d'un traitement à haute fréquence ne doivent contenir ni alcool ni substance à base d'alcool afin d'empêcher toute combustion accidentelle.

- Ne touchez jamais l'intérieur de l'œil avec une électrode à haute fréquence.

- Veillez à ne toucher que la poignée du combiné à haute fréquence.

MAINTENANCE

- Les tuyaux d'électrode en verre doivent être gardés propres et secs, et doivent être stérilisés avant ou après chaque utilisation.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10009	ÉLECTRODE 1
10010	ÉLECTRODE 2
10011	ÉLECTRODE 3
10012	ÉLECTRODE 4
10024	ÉLECTRODE SPÉCIALE 1
10025	ÉLECTRODE SPÉCIALE 2
10026	ÉLECTRODE SPÉCIALE 3
10040	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE

ADVERTISSEMENT

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous