

Les Tables
de Franck

HYDRAFACIAL

Appareil d'Exfoliation

Mode d'emploi

FR

HIDRODERMABRASION

Fonction appropriée aux nettoyages en profondeur et aux traitements pour éliminer des points noirs, acné, saleté accumulée dans la peau et pour des peaux grasses. Aussi recommandée ensemble avec des traitements de réduction de graisse et pour augmenter l'élasticité et le tonus de la peau.


1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « abrasion ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement.
3. Insérez la tête correspondante sur le manchon selon la zone à traiter.
4. Choisissez la bouteille du produit que vous souhaitez utiliser au moyen de la roue centrale en la plaçant sur la lettre de la bouteille souhaitée. Par exemple, si vous voulez appliquer un traitement oxygénant, placez la roue centrale sur la lettre D.
5. Entre chaque produit, appuyez sur la tête du manchon avec le doigt pendant 4-5 secondes plusieurs fois pour la nettoyer.

Contenu du colis



Mise en service

- Ouvrez le colis et vérifiez qu'il contient tous les accessoires de l'appareil et qu'ils sont en bon état. Il faut conserver l'emballage pour des possibles réclamations.
- Vérifiez que l'appareil soit en bon état. S'il y a n'importe quel souci, contactez votre distributeur.
- Placez l'appareil dans une chambre propre et bien ventilée avec une température d'entre 5 et 40°. L'humidité relative ne devrait pas dépasser le 80%. Ne placez aucun objet à moins de 5 cm de l'appareil.
- Ne placez des objets sur la machine.
- Placez les bouteilles arrière et avant. Pour extraire les bouteilles arrière, il faut les dévisser. Pour ceux de devant, tapez le bouton supérieur et vous pourrez les sortir.
- Branchez le fil électrique noir sur la prise de courant et allumez l'appareil.
- Nettoyez les bouteilles avant de les remplir des produits de beauté. Pour les vider et nettoyer après le traitement, assurez-vous que l'appareil est éteint car si le produit rentre dans l'appareil il pourrait l'endommager et à ses composants.

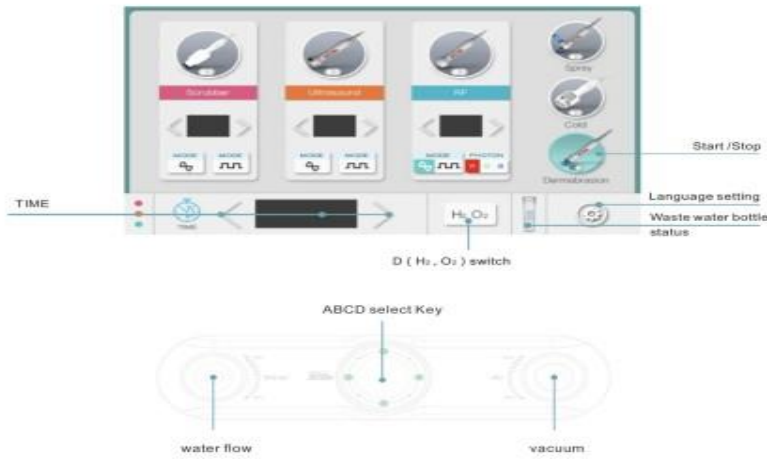

ULTRASON

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « ultrasound ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Faites clic sur le bouton « ultrasound » de l'écran pour démarrer le traitement.
5. Bougez le manchon en appuyant légèrement la peau de bas en haut le long des lignes d'expression du visage pendant 5-8 minutes.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint quand vous le nettoyez.
- Utilisez un chiffon sec et propre pour nettoyer la machine. Vous pouvez l'humidifier légèrement sur les taches ou sur des zones de saleté extrême.
- Pour le nettoyage du manchon de hydrodermabrasion, sélectionnez la bouteille C et réglez l'intensité d'aspiration au maximum. Faites clic sur « start » et tenez le doigt placé sur la tête pendant 5-10 secondes. Sortez la tête et répétez le mouvement 8-10 fois. Une fois la bouteille C soit propre et vide, remplissez les bouteilles A et B d'eau tiède et répétez la même action avec ces deux bouteilles, ça évitera que les tuyaux et manchons se bouchent. Une fois terminé, sortez la tête et nettoyez-la avec les autres avec un chiffon afin d'éliminer le reste de saleté. Vous pouvez aussi les faire tremper avec de l'alcool ou un produit désinfectant pendant un minute.
- Pour nettoyer le manchon spray, remplissez le réceptacle du manchon avec de l'eau tiède, faites clic sur « start » et pulvérisez l'eau tiède.
- Pour le reste de manchons, nettoyez-les avec un chiffon humide en eau tiède après chaque utilisation.

6. Les têtes devraient se changer selon la zone du patient à traiter, ainsi qu'ajuster l'intensité d'aspiration selon la peau et zone du traitement.
7. Faites clic sur le bouton "H2 O2" et/ou "Dermaabrasion" de l'écran selon le traitement que vous souhaitez appliquer et attendez 3 minutes avant de commencer la pulvérisation. La fonction choisie peut aussi s'allumer au moyen des boutons latéraux du manchon.

8. Après le traitement, nettoyez les bouteilles ABCD et les tuyaux afin d'éviter qu'ils se bouchent.

MARTEAU FROID

Fonction conseillée après des traitements de rajeunissement de la peau, diminution de la taille des pores, élimination de rougeurs, réduction de la sensibilité et amélioration du tonus de la peau.

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « cold ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel sur la zone à traiter.
3. Faites clic sur le bouton « cold » de l'écran.
4. Mettez le marteau en contact avec la peau du patient sur les zones à traiter.

RADIOFRÉQUENCE


1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « RF ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et appliquez du gel/produit sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Faites clic sur le bouton « RF » de l'écran pour démarrer le traitement.
5. Bougez le manchon en appuyant légèrement la peau de bas en haut ou faites des petits cercles le long du visage.
6. Le temps de traitement recommandé est de 10 – 15 minutes.

PEELING ULTRASONIQUE

Fonction conseillée pour des traitements d'élimination de peaux mortes, pour combattre l'excès de cuticules et amélioration de la texture de la peau.

MODE A: Peeling

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « scrubber ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et séchez-le bien. Appliquez la lotion désincrustante sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait utiliser la première pour des traitements de peau normale et tissus plus épais, par contre la deuxième est conçue pour des zones plus sensibles et des tissus plus fins. Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Maintenez les boutons latéraux de la spatule appuyés de façon simultanée et placez-la inclinée environ 45° comme sur l'image inférieure.
5. Le temps de traitement est approximativement d'entre 15 et 20 minutes.

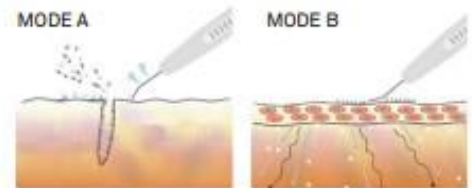

MODE B: Courant galvanique

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « scrubber ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement et séchez-la bien. Appliquez la lotion appropriée pour la fonction galvanique sur la zone à traiter.
3. Choisissez le temps du traitement, réglez l'intensité de l'1 au 10 avec les flèches et choisissez le type d'onde avec les boutons "MODE" : onde continue (bouton gauche) et onde pulsée (bouton droit). Il faudrait commencer par l'onde continue et régler l'intensité progressivement.
4. Maintenez les boutons latéraux de la spatule appuyés de façon simultanée, appuyez-la fermement contre la peau et faites-la glisser le long des lignes d'expression selon l'image supérieure.

SPRAY

1. Branchez le fil électrique sur la prise latérale « spray ». Placez-le de façon que le mot « open » se trouve dans la partie supérieure du fil.
2. Nettoyez le visage du patient avant le traitement.
3. Versez le produit que vous souhaitez pulvériser dans le petit réceptacle en plastique qui s'adapte sous pression au manchon spray.
4. Faites clic sur le bouton "spray" de l'écran.
5. Orientez le manchon vers la zone à traiter et commencez à pulvériser la lotion.
6. Si la tête se bouche pendant le traitement, nettoyez le reste accumulé dans la tête avec l'aide d'une aiguille ou un outil petit.

Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil avec :

- Patients avec des peaux hyper-sensibles ou acné sévère.
- Patients avec diabète, problèmes de haute pression artérielle ou cholestérol élevé.
- Patients avec une infection cutanée contagieuse.
- Patients avec un stimulateur cardiaque, un défibrillateur automatique implantable (DAI) ou n'importe quel autre dispositif électromagnétique implanté.

- Quand l'appareil est en marche, s'il émet un bip il faudrait vérifier le voyant de la bouteille de déchets sur l'écran. Si le voyant clignote, videz les bouteilles et placez-les à nouveau après la vidange.

Remplissez les bouteilles des produits suivants :

- A : Produit nettoyage profond
- B : Produit hydratant
- C : Solution désinfectante
- D : Produit oxygénant (bouteille arrière H2 O2)

PRÉCAUTIONS

- Pendant les 24 heures postérieures au traitement il faudrait utiliser crème solaire et voir avec votre esthéticienne quels produits cosmétiques vous pouvez appliquer sur la peau.
- Si le patient souffre anaphylaxie ou acné sévère, il a des problèmes de circulation ou la peau hypersensible, il faudrait consulter le médecin spécialiste avant d'utiliser ce traitement.
- Si le patient perçoit des gênes sur la peau pendant le traitement, arrêtez le traitement.

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	43x45,5x31
	Poids brut (kg)	9,5
	Dimensions produit (cm)	26x40x38
	Dimensions de l'écran (pouces)	7"
Caractéristiques de travail	Fréq. Ultrason	1 MHz
	Fréq. Bipolar RF	1 MHz
	Puissance d'aspiration	650 cm/hg
	Puissance débit d'eau	30 l / h
	Pression	80 Kpa
Caractéristiques électriques	Tension nominale	230 V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	100 W