

Les Tables
de Franck

EXFOLIATION VISAGE

Appareil d' Exfoliation

Mode d’emploi

FR

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• Il doit être placé sur un guéridon.

• Il doit être utilisé dans un endroit où le câble de la sonde peut être branché (environ 50 cm).


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes :

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.





L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

| No. | PRODUIT | RÉF. | QTÉ. |
|-----|---------------------|-------|------|
| 1 | SONDE D'EXFOLIATION | 10018 | 1 |
| 2 | PROTECTEUR | - | 1 |
| 3 | BRACELET | 10019 | 1 |
| 4 | UNITÉ PRINCIPALE | - | 1 |
| 5 | CÂBLE ALIMENTATION | - | 1 |

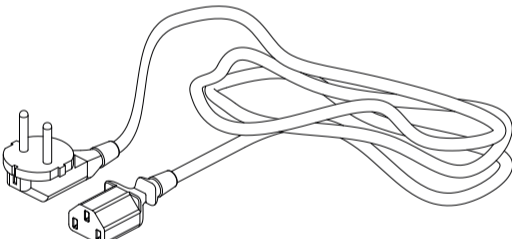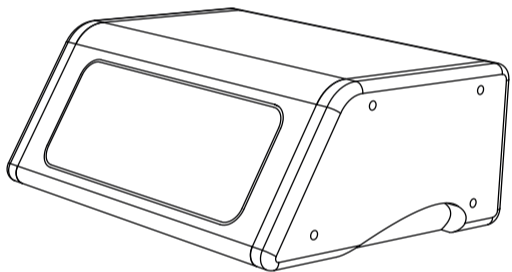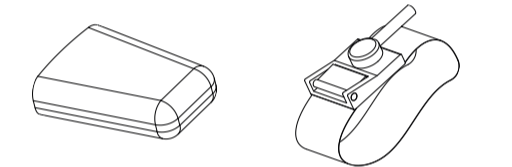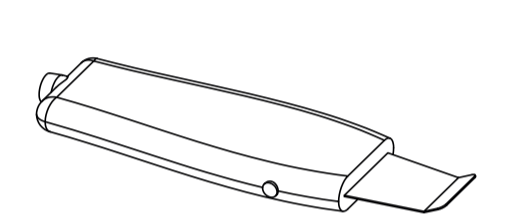

PANNEAU AVANT/PANNEAU ARRIÈRE

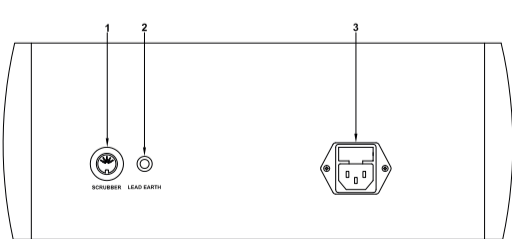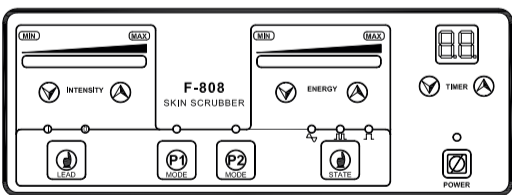

1. Sonde d'exfoliation

2. Bracelet

3. Câble alimentation

MODE D'EMPLOI

1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.

3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton «POWER».

Usage galvanique

1. Appliquez le produit polarisé adapté sur la zone à traiter.

2. Appuyez sur le bouton «P1 MODE» pour activer la fonction galvanique.

3. Sélectionnez la polarité du courant souhaité en appuyant sur le bouton «LEAD» pour changer entre la polarité positive (indiquée par la LED «I») et la polarité négative (indiquée par la LED «O»).

| Pôle positif (I) | Pôle négatif (O) |
|---------------------------|-----------------------------|
| Des solutions de pH acide | Des solutions de pH alcalin |

5. Ajustez l'option «INTENSITY» au niveau souhaité.

6. Utilisez la sonde sur la peau.

USAGE DE PEELING PAR ULTRASONS

1. Placez le bracelet autour du poignet du client.

2. Appliquez généreusement le produit conducteur sur la surface de la peau.

3. Appuyez sur le bouton «P2 MODE» pour activer la fonction peeling.

4. Sélectionnez le type d'ondes (continue, pouls, ou combinée) en appuyant sur le bouton «STATE».

5. Ajustez l'option «ENERGY» au niveau souhaité.

6. Utilisez la sonde sur la peau.

USAGES GALVANIQUE ET ULTRASONS COMBINÉS

1. Placez le bracelet autour du poignet du client.

2. Appliquez du gel conducteur sur la zone de traitement.

3. Appuyez sur les boutons «P1 MODE» et «P2 MODE» pour activer la fonction combinée.

4. Sélectionnez le type d'onde (continue, pouls ou combiné) en appuyant sur le bouton «STATE».

5. Ajustez les options «ENERGY» et «INTENSITY» aux niveaux souhaités.

6. Utilisez la sonde sur la peau.

NOTES

• Un système de contrôle à la terre est mis en place lorsque l'appareil est en marche. Cela signifie que si l'appareil ne trouve pas un accès à la terre, le système empêchera le passage du courant jusqu'à la sonde. Cependant, une fois que la sonde trouve un accès à la terre (contact avec la peau du client), le système se remettra en marche immédiatement. Ceci est une mesure de sécurité et ne doit pas être considéré comme une défaillance du système.

• La sonde ne vibrera pas avec le programme P1.

CAUTIONS

• N'utilisez pas avec personnes souffrant de maladies coronaires, infectieuses, personnesavec des implants métalliques et peaux hypersensibles et vasculaires.

• N'utilisez la sonde dans une position sur la peau pendant trop long temps afin d'éviter le risque de brûlures.

• Utilisez toujours la sonde avec soin. Les composants sont très délicats. Faites spécial attention avec la lame parce que tout dommage pourrait provoquer des blessures.

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| Poids et taille | Taille de l'emballage (cm) | 39x36x18,5 |
| | Poids brut (kg) | 4,3 |
| | Dimensions produit (cm) | 33x17/24x13 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Caractéristiques de travail | Puissance de travail | 6 W |
| | Fréquence de travail | 25 - 27 KHz |
| | Temps de travail | 15 min |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| Caractéristiques électriques | Tension nominale | 220V ~ 240V |
| | Fréquence | 50Hz/60Hz |
| | Puissance nominale | 29 W |

FAQ

La sonde s'arrête soudainement:

• Si la sonde est séparée de la peau, elle s'arrêtera d'émettre après 5 secondes. Ceci est une mesure de sécurité et doit pas être considéré comme une défaillance du système.

• Touchez la peau avec la sonde et elle recommencera à émettre après 5 secondes.

MAINTENANCE

• Si de l'huile venait à entrer en contact avec la sonde, elle doit être retirée immédiatement.

• Après utilisation, veuillez nettoyer la sonde et la garder propre. Rangez-la dans le sac de protection de la sonde à tout moment.

• Rangez la sonde avec précaution pour empêcher tout endommagement.

ACCESSOIRES

| RÉF. | DESCRIPTION |
|-------|---------------------|
| 10018 | SONDE D'EXFOLIATION |