

APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Appareil Haute Fréquence Portable

Mode d'emploi

FR

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIEN VENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez

lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.


L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	ÉLECTRODE 1	10009	1
2	ÉLECTRODE 3	10011	1
3	ÉLECTRODE 4	10012	1
4	ÉLECTRODE SPÉCIAL 3	10026	1
5	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE	-	1

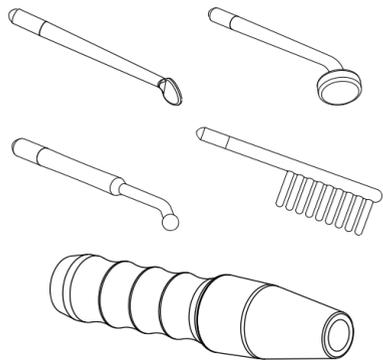


MODE D'EMPLOI

1. Choisissez le tuyau d'électrode en verre adapté

et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche (veillez à ne pas toucher l'électrode de verre avec vos mains ou tout autre objet en métal).

2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «POWER» et assurez-vous que l'option «ENERGY» est réglée sur le minimum.

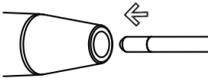

3. Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «ENERGY».

4. Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.

5. À la fin du traitement, avant de retirer l'électrode du visage du client, veuillez réduire doucement le niveau de rendement au niveau minimal.

USAGE INDIRECT

1. Prenez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans le bec de sortie de la poignée.

2. Donnez le combiné au client, en vous assurant qu'il touche l'électrode en verre et non le combiné.

3. Mettez l'appareil en marche et assurez-vous que le régulateur est réglé au minimum.

4. Ajustez lentement l'éjection en réglant le régulateur.

5. Effectuez le massage facial ou le traitement. Au cours du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode de verre qui est tenue par le client.

6. À la fin du traitement, réduisez lentement le niveau jusqu'au niveau de rendement minimum puis éteignez l'appareil.

CAUTIONS

• L'électrode en verre brillera lorsque se trouve à moins de 2 cm de la peau lorsque l'instrument

est allumé. Dans ce cas, réduisez l'énergie de l'appareil à haute fréquence. Si le client sent toujours l'étincelle, il peut se couvrir le visage avec une petite serviette en coton mais jamais avec une serviette en nylon ou synthétique.

• Avant de retirer l'électrode de verre de la peau, réduisez l'option «ENERGY» à son minimum puis éteignez l'appareil avant de le retirer de la peau.

• Les clients ne peuvent pas porter d'objets en métal ou de bijoux ; tous les objets doivent être retirés avant de commencer le traitement.

• Les femmes enceintes ou les personnes ayant un pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur) ne peuvent pas être soumis à des traitements à haute fréquence.

• Les produits utilisés lors d'un traitement à haute fréquence ne doivent contenir ni alcool ni substance à base d'alcool afin d'empêcher toute combustion accidentelle.

• Ne touchez jamais l'intérieur de l'œil avec une électrode à haute fréquence.

• Veillez à ne toucher que la poignée du combiné à haute fréquence.

MAINTENANCE

• Les tuyaux d'électrode en verre doivent être gardés propres et secs, et doivent être stérilisés avant et après chaque utilisation.

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10009	ÉLECTRODE 1
10010	ÉLECTRODE 2
10011	ÉLECTRODE 3
10012	ÉLECTRODE 4
10024	ÉLECTRODE SPÉCIAL 1
10025	ÉLECTRODE SPÉCIAL 2
10026	ÉLECTRODE SPÉCIAL 3

Vous trouverez plus d'information sur le site: www.weelko.com

SPÉCIFICATIONS

Poids et tailles	Taille de l'emballage (cm)	32,5x21x6
	Poids brut (kg)	0,8
	Dimensions produit (mm)	23xØ4,5
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	650.000 GHz
Caractéristiques électriques	Tension nominalel	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz