

Les Tables  
de Franck

## BROSSES ROTATIVES

Appareil d'exfoliation à brosses rotatives

Mode d'emploi

FR

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.






L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE



• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTE.
1	MANCHE BROSSE ROTATIVE	10074-8	1
2	BROSSE 1	10073	1
3	BROSSE 2		1
4	BROSSE 3		1
5	BROSSE 4		1
6	BROSSE 5		1
7	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
8	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

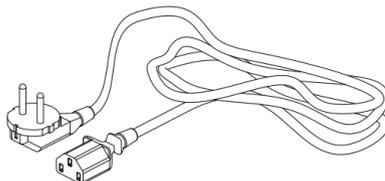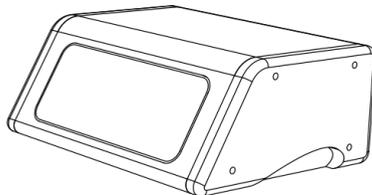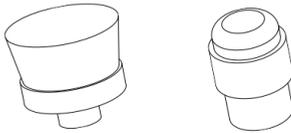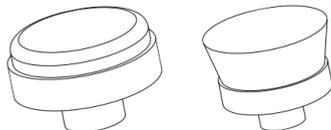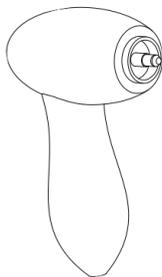

### PANNEAU AVANT/PANNEAU ARRIÈRE

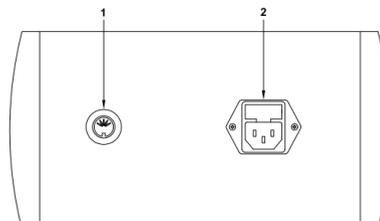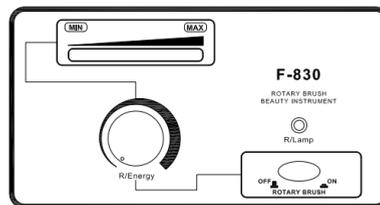

1. Manche brosse rotative

2. Câble alimentation

### MODE D'EMPLOI

#### AVANT LE TRAITEMENT:

1. Frottez la surface de la peau avec un chiffon humide.

2. En utilisant un vaporisateur (ou un chiffon chaud) afin d'adoucir la surface de la peau dans la zone de traitement.


3. Après un nettoyage de la peau, il est recommandé de badigeonner la surface de la zone de traitement avec de l'huile nourrissante.

#### AU DÉBUT DU TRAITEMENT:

1. Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière, indiqué sur le schéma par l'expression «POWER LINE INPUT».

2. Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.

3. Choisissez la tête de brosse adaptée au type de peau du client. Il est recommandé d'utiliser une brosse douce pour les peaux délicates et sensibles, et d'utiliser une brosse dure pour les peaux dures ou grasses.

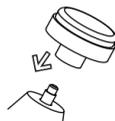

4. Mettez la fonction «ROTARY BRUSH» en marche.

5. En tenant le manche de la brosse en main, ajustez «R/ENERGY». La vitesse de rotation augmentera en fonction de l'augmentation de l'angle.

### ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10074-8	MANCHE BROSSE ROTATIVE
10073	BROSSE 1
	BROSSE 2
	BROSSE 3
	BROSSE 4
	BROSSE 5

### CAUTIONS

• N'appuyez pas excessivement sur la tête de la brosse lorsqu'elle fonctionne.

• N'utilisez pas cet instrument avec une substance acide ou alcaline évidente.

• Après l'opération, éteignez l'instrument et débranchez le cordon d'alimentation.

• Cette fonction ne doit pas être utilisée avec des clients qui souffrent d'une peau hyper-sensible ou présentent une dermatite.

• Si les vaisseaux capillaires de la peau sont atteints, n'utilisez pas cette fonction pour le nettoyage de la peau.

### MAINTENANCE

• Après le traitement, submergez la tête de la brosse dans de l'eau claire avec un petit peu de produit pendant 5 minutes. Puis, après le rinçage, submergez-la dans de l'alcool pendant une demi-heure.

• La tête de la brosse doit être désinfectée en utilisant des radiations ultra-violettes puis gardée dans son emballage original.

### SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	36x31x18,5
	Poids brut (kg)	4,3
	Dimensions produit (cm)	31x17/24x13
Caractéristiques de travail	Vitesse de rotation	0 - 550 RPM
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	25 W

### ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains) ; ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

### RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

### BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous