

Mode d'emploi pour

Unité chauffante

petit modèle, 6 Quart & grand, 18 Quart



table des matières

Introduction dans le massage aux pierres chaudes	S. 2
Informations de sécurité importantes.....	S. 2
Contre-indication et précautions d'emploi.....	S. 3
Avant la première utilisation.....	S. 3
mode d'emploi.....	S. 4
Diagnostic.....	S. 5
Entretien et nettoyage.....	S. 5
Garantie et service.....	S. 6

Introduction dans le massage aux pierres-chaudes

Le massage avec les pierres chaudes représente en matière de bien-être et de thérapie, un traitement bienfaisant et varié.

Comme toute technique, cette méthode demande un maniement soigneux afin d'assurer la sécurité du patient.

Nous recommandons vivement de lire attentivement les indications suivantes avant la première utilisation de l'unité chauffante.

Informations de sécurité importantes

L'utilisation de l'unité chauffante pour pierres chaudes demande, comme pour tout appareil électrique, de respecter des indications de sécurité fondamentales :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
2. Prêtez attention à ne pas entrer en contact avec les parties chauffantes de l'appareil. Utilisez les poignées ou mettez des gants.
3. Afin d'éviter toute électrocution, ne plongez ni le câble, ni la prise, ni l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Avant de débrancher l'appareil, prenez soin d'éteindre l'appareil en le mettant sur la position OFF. Pour cela, activer le bouton ON / OFF.
5. N'utilisez aucun appareil électrique pendant le bain ou la douche.
6. Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
7. Débrancher l'appareil pendant le nettoyage ou quand l'appareil n'est pas en utilisation. Laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage ou avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces.
8. N'utilisez JAMAIS un appareil électrique avec un câble ou une prise endommagée.
9. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandé par le fabricant et peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures sérieuses.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre.
11. Prêtez attention à ce que le câble ne passe pas sur un coin de table et ne touche pas de source chauffante.
12. Ne pas poser l'appareil près de brûleur électrique ou à gaz ou encore près de four chauffant.
13. N'utilisez pas cet appareil pour autres utilisations que celles décrites dans ce manuel.
14. Toujours mettre les pierres en premier et ajouter l'eau ensuite.
15. Remplissez la baignoire amovible jusqu'à maximum 2,5 cm sous le rebord. Posez l'appareil sur une surface plate.
16. Ne pas utiliser les pierres chaudes en cas de : irritation de la peau, brûlure, coupure ou autre irritation ou encore sur les peaux sensibles ou endommagées.

17. N'essayer EN AUCUN CAS de remplir un appareil électrique branché dans la baignoire ou un évier. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !!!
18. Vérifiez soigneusement la température de chaque pierre avec les doigts et gardez la pierre quelques secondes dans les mains, avant de l'appliquer sur une personne.
19. Pour éviter toute brûlure, utilisez des gants résistants à la chaleur ou la cuillère en bois fournie pour enlever les pierres de la baignoire.
20. Pour éviter toute brûlure, n'ajoutez pas d'eau bouillante dans la baignoire.

Indication importante : le câble de l'unité chauffante est court afin d'éviter tout risque de trébucher

Contre-indication et précautions d'emploi

1. L'unité chauffant pour pierres chaudes ne doit pas être utilisée dans les cas suivants : Tuberculose, Tumeur ou blessure ouverte, hématome, froissure, contusion, peau sensible, thrombose, thrombophlébite, sclérose ou douleur encore inexpliquée dans le mollet.
2. Les Femmes enceintes, les personnes diabétiques ou avec autres maladie devrait consulter un médecin avant tout traitement.
3. Consultez votre médecin en cas de doute sur un traitement avec des pierres chauffées électriquement.
4. Interrompez le traitement avec l'unité chauffante et consultez un docteur en cas de malaise durant la thérapie.
5. N'utilisez pas l'appareil en état de fatigue ou d'épuisement.
6. Cet appareil n'est PAS UN JOUET. Attention de ne l'utiliser qu'avec grande précaution. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Avant la première utilisation

1. Déballez l'appareil totalement, enlevez toute forme d'emballage, également à l'intérieur et toutes les étiquettes. Veuillez également enlever la baignoire. Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et bien aérée.
2. Assurez-vous que l'appareil corresponde à la tension électrique de votre secteur. Vous trouverez une étiquette sous l'appareil sur laquelle vous trouverez les informations nécessaires.
3. Branchez l'appareil dans la prise. Vous pouvez à présent choisir si vous souhaitez la température en °C(Celsius) ou en °F (Fahrenheit) en appuyant sur la touche + et -
4. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche (ON / OFF). Actionnez la touche + afin de régler la température à 70°C que vous voyez dans la fenêtre à gauche (Setting).
5. Laissez l'appareil tourner sans la baignoire pendant env. 1 heure, jusqu'à ce que toute fumée ou odeur ait disparu.
6. La formation de fumée et d'odeur est un effet secondaire normal car l'émail se durcie. Ces effets disparaissent lors de l'utilisation quotidienne de votre appareil.
7. Lorsque le procès de durcissement est terminé, éteignez l'appareil en actionnant la touche ON / OFF. Débranchez la prise et laissez refroidir.

Mode d'emploi

1. Nettoyez les pierres avant la première utilisation.
2. Posez une serviette sur le sol de la baignoire et posez les pierres sur la serviette.
3. Avant de brancher l'appareil, versez l'eau dans la baignoire amovible de façon à recouvrir les pierres, faites attention de toujours laisser minimum 2,5 cm jusqu'au bord de la baignoire.
4. Branchez l'appareil dans une prise standard de 230V, allumez l'appareil à l'aide de la touche ON / OFF et choisissez la température que vous souhaitez atteindre en appuyant sur + / -, vous voyez la température sur la fenêtre à gauche (Setting). Dans la fenêtre de droite (Current) vous voyez la température actuelle. Lorsque la température souhaitée est atteinte, elle est maintenue automatiquement par de faibles fluctuations.

L'affichage montre une température de 0°C à 93°C. Lorsque vous la température est inférieure, vous verrez „L“ dans la fenêtre de gauche. Si vous la température est supérieure, „E1“ s'affiche dans cette même fenêtre.

5. Utilisez un thermomètre afin de mesurer la température de l'eau dans la baignoire et vous assurer ainsi que les pierres ont la température thérapeutique souhaitée. Consultez un professionnel si vous doutez de la bonne température.
6. Quand le voyant est allumé (Heat), cela montre que l'élément chauffant est en action. Quand le voyant s'éteint, la température souhaitée est atteinte.
7. Enlevez prudemment les premières pierres du réservoir. Contrôlez la température avec les doigts et ensuite en posant la pierre dans la paume de la main. La température doit être chaude, mais pas désagréable.
8. Lorsque vous avez terminé le traitement, éteignez l'appareil (OFF). Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
9. Lors de la prochaine utilisation, la température utilisée précédemment est enregistrée et l'appareil chauffe automatiquement jusqu'à la température indiquée.
10. Prenez garde de ne pas jeter les pierres dans l'appareil ou ne pas les laisser tomber, car cela peut endommager l'appareil. Soyez prudent en retirant ou en posant les pierres.
11. Ne posez pas les pierres sur des parties du corps infectées.

Diagnostic

Appuyez sur la touche ON /OFF pendant 3 sec. pour effectuer test automatique de diagnostic. Si „198“ s'affiche dans la fenêtre de gauche et „176“ dans la fenêtre de droite et vous entendez un ton, cela veut dire que l'appareil fonctionne parfaitement bien.

Si „E1“ s'affiche, cela veut dire qu'il y a un court-circuit interne. L'appareil doit être réparé par un spécialiste. Si „E2“ s'affiche, cela signifie qu'il y a un problème technique, dans ce cas, ne plus utiliser l'appareil.

Entretien et Nettoyage

1. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
2. Eteignez l'appareil (OFF) et débranchez la prise avant le nettoyage.
3. Laissez refroidir l'appareil à température ambiante avant de retirer des pièces ou avant le nettoyage.

4. Retirez d'abord toute les pierres et videz l'eau ensuite.
5. Nettoyez la cuve et le couvercle avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Nettoyez ces deux parties et rincez les bien. Essuyez les avec une serviette sèche.
6. Dépoussiérez l'appareil avec une serviette humide. Soyez extrêmement prudent lors du nettoyage du l'élément chauffant et ne jamais le plonger dans l'eau ou poser dans un évier.
7. Nettoyez les pierres avec un nettoyant doux dans de l'eau chaude. Rincez les pierres à l'eau claire et chaude et essuyez les bien avant de les ranger.

Garantie et Service

La garantie du fabricant pour l'unité chauffante pour pierres chaudes est d'un an à partir de la date d'achat. Cela touche les vis de construction et/ou Les vis duent au matériau.

Les endommagements duent au transport, à une utilisation inadéquate, accident ou autre influence sont exclus de la garantie.

Cette unité chauffante pour pierres chaudes est dotée de nombreuses mesures préventive de sécurité. Toute modification exercé sur cette appareil par votre propre arbitre vous fait perdre toute garantie.

En cas de réclamation, nous vous prions de nous contacter par téléphone ou par écrit. Pour cela, nous vous prions de nous faire part du n° de modèle que vous trouvez sur le dessous de l'appareil.