

THERMOTHÉRAPIE

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EC

RECYCLAGE

Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que

requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.




L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.


No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	COUVERTURE CHAUFFANTE	40002.1	1
2	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
3	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

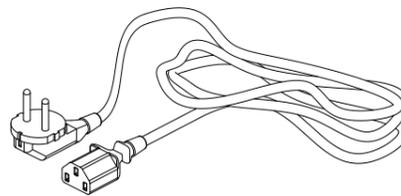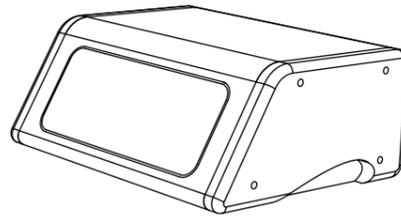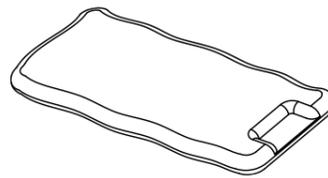

PANNEAU AVANT

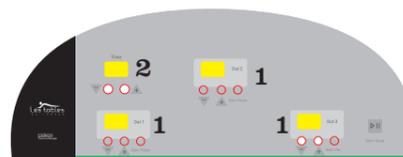

1. Contrôle de température des trois zones
2. Minuterie

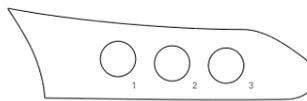

3. Sorties des tuyaux d'air

MODE D'EMPLOI

Nous vous conseillons d'appliquer un massage avant et après le traitement de thermothérapie.

1. Branchez les câbles sur le panneau arrière marqué sur le visuel comme « POWE LINE INPUT ».
2. Branchez les 3 accessoires correctement sur le panneau avant comme indiqué sur le visuel.
3. Allumez l'appareil moyennant le bouton «START» à droite.
4. L'appareil dispose de 3 zones réglables en température de façon indépendante.

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	58x41x52
	Poids brut (kg)	9
	Dimensions produit (cm)	48x13x32
	Taille couverture chauffante (cm)	180x80
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	300 W
	Température de travail	30 - 50°C
	Température maximum	55°C
	Temps de travail	30 min
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz

5. Réglez le temps du traitement entre 1 et 60 minutes dans un premier moment en utilisant les boutons + / -.

6. Réglez la température souhaitée pour chaque zone moyennant les boutons + / - et appuyez sur le bouton START/PAUSE de chacun des zones. La plage de température est de 40 à 85 °C. (En termes de sensation thermique la plage serait de 30 à 50 °C).

7. Une fois terminé le traitement, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton « START » à droite.

CAUTIONS

• Si la surface de la couverture chauffante est cassée ou la couverture ancienne, veuillez la remplacer par une nouvelle afin d'empêcher les brûlures accidentelles de la peau ou les décharges électriques.

• À cause de sa puissance élevée, la couverture chauffante peut générer des radiations magnétiques légères au corps humain. Notez que les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant une peau sensible doivent éviter d'utiliser cet instrument. Veuillez vous hydrater correctement avant chaque traitement afin d'éviter la déshydratation et les coups de chaleur.

• Vérifiez avec le patient si la température est appropriée pendant le traitement.

MAINTENANCE

• Le revêtement en cuir de cette couverture est en PVC. Veuillez garder la couverture sèche et propre après chaque utilisation. Si le cuir est taché avec de la crème amincissante ou toute autre substance, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre pour retirer la substance. N'utilisez jamais de liquides naturels acides ou alcalins pour le nettoyage.

• Veuillez couper l'alimentation électrique lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période. Gardez l'emballage et les accessoires séparément dans un endroit sec.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
40002.1	COUVERTURE CHAUFFANTE